


# BARRX™

## ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA

### GUIA RÁPIDO DE PROCEDIMENTO

	CATETER	ABLAÇÃO/ PROTOCOLO DE LIMPEZA	AJUSTE DE ENERGIA
ESÔFAGO DE BARRETT	Barrx™ Cateter Balão 360 Express RFA	1 – limpeza – 1	10 J/cm <sup>2</sup>
	Barrx™ Cateter de Canal Endoscópico RFA	2 – limpeza – 2	12 J/cm <sup>2</sup>
	Barrx™ Cateter Focal 60 RFA	2 – limpeza – 2	
	Barrx™ Cateter Focal 90 RFA	2 – limpeza – 2	
	Barrx™ Cateter Focal Ultra Longo RFA	1 – limpeza – 1	
GAVE	Barrx™ Cateter de Canal Endoscópico RFA	1 – 4 (não limpar)	12 J/cm <sup>2</sup>
	Barrx™ Cateter Focal 60 RFA		
	Barrx™ Cateter Focal 90 RFA		
	Barrx™ Cateter Focal Ultra Longo RFA		
PROCTOPATIA POR RADIAÇÃO	Barrx™ Cateter de Canal Endoscópico RFA	1 – 2 (não limpar)	12 J/cm <sup>2</sup>
	Barrx™ Cateter Focal 60 RFA		
	Barrx™ Cateter Focal 90 RFA		
NÃO UTILIZAR SOLUÇÃO SALINA OU LUBRIFICANTE	Representação da área tratada (esquerda para direita): Barrx™ Cateter Focal Ultra Longo RFA, Barrx™ Cateter Focal 90 RFA, Barrx™ Cateter Focal 60 RFA, Barrx™ Cateter de Canal Endoscópico RFA		

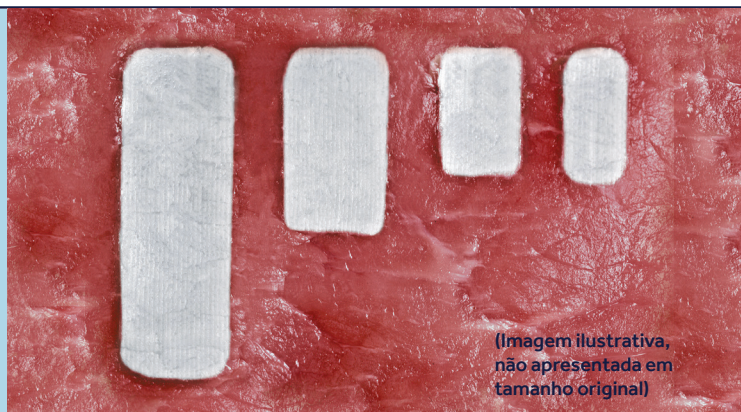

## CATETER

## ESPECIFICAÇÕES

## CÓDIGOS

Barrx™  
Cateter Balão  
360 Express RFA



Comprimento do balão: 8 cm  
Comprimento do eletrodo: 4 cm  
Diâmetro do eixo do cateter: 7mm  
Comprimento do eixo do cateter: 85 cm  
Número máximo de ablações: 16

64082

Barrx™  
Cateter de Canal  
Endoscópico RFA



**Recomendação de tamanho de endoscópio:**  
Endoscópios com diâmetro de canal de trabalho de 2.8mm ou maiores

**Eletrodo**  
15.7 mm comprimento - 7.5 mm largura (Quando o eletrodo está desdobrado)  
Diâmetro do eixo do cateter: 2.5 mm  
Comprimento do eixo do cateter: 135 cm  
Número máximo de ablações: 120

TTS-1100

Barrx™  
Cateter Focal  
60 RFA



**Recomendação de tamanho de endoscópio:**  
8.6 mm a 9.8 mm

**Eletrodo**  
15 mm comprimento - 10 mm largura  
Diâmetro do eixo do cateter: 4 mm  
Comprimento do eixo do cateter: 160 cm  
Número máximo de ablações: 80

90-9300

Barrx™  
Cateter Focal  
90 RFA



**Recomendação de tamanho de endoscópio:**  
8.6 mm a 12.8 mm

**Eletrodo**  
20 mm comprimento - 13 mm largura  
Diâmetro do eixo do cateter: 4 mm  
Comprimento do eixo do cateter: 160 cm  
Número máximo de ablações: 80

90-9100

Barrx™  
Cateter Focal  
Ultra Longo RFA



**Recomendação de tamanho de endoscópio:**  
8.6 mm a 9.8 mm

**Eletrodo**  
40 mm comprimento - 13 mm largura  
Diâmetro do eixo do cateter: 4 mm  
Comprimento do eixo do cateter: 160 cm  
Número máximo de ablações: 80

90-9200

**Informações sobre riscos:** A seguir estão os efeitos colaterais transitórios que podem ser esperados após o tratamento: dor no peito, dificuldade para engolir, dor ao engolir, dor na garganta e / ou febre. Complicações observadas em frequência muito baixa incluem: laceração da mucosa, sangramento agudo, estenose esofágica, perfuração, arritmia cardíaca, derrame pleural, aspiração e infecção. Complicações potenciais que não foram observadas incluem: morte. Por favor, consulte o manual do usuário do produto para obter informações detalhadas adicionais.

Reg. nº 10349000491. - © 2019 Medtronic. Todos os direitos reservados. Medtronic, o logo da Medtronic e Outros são, em conjunto, marcas registradas da Medtronic. ™\* Marcas de terceiros são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Todas as outras marcas são marcas registradas de uma empresa da Medtronic. M. Luz 03/2019.

**Medtronic**